

PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Dolder ++


- 1 -

Voici la prothèse sur le modèle après que l'essai en bouche a été effectué. Le cas a été envoyé à Panthera Dental pour la fabrication de la barre.



- 2 -

Faire une matrice de la prothèse à l'aide du silicone de votre choix. Il est recommandé d'utiliser un silicone rigide.

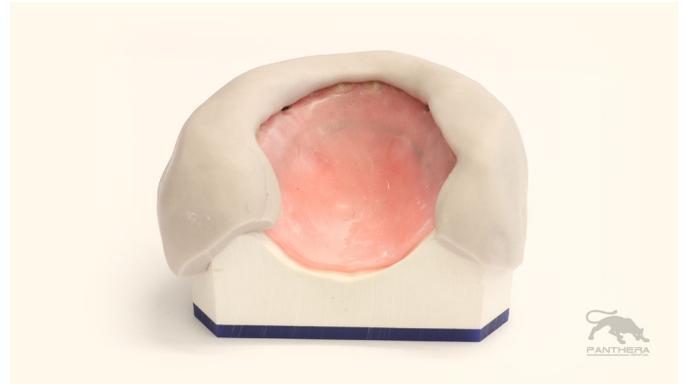

- 3 -

La prothèse est retirée du modèle qui comprend les tissus mous.




- 4 -

La barre Dolder++ est vissée sur le modèle maître.



- 5 -

En vue de dupliquer le modèle maître, boucher les espaces sous la barre avec de la cire.

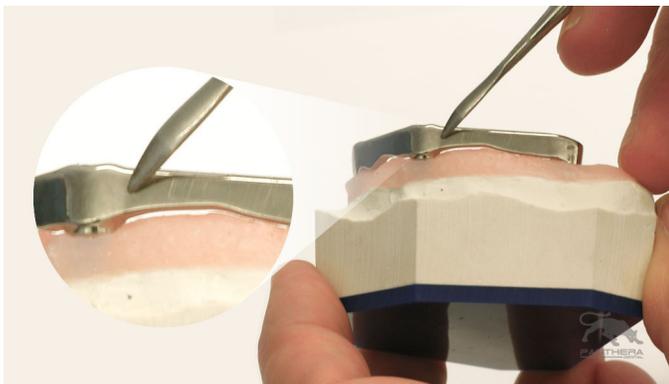

- 6 -

Recouvrir le Gingifast avec un séparateur pour éviter que le silicone de duplication n'adhère au Gingifast.



PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Dolder ++

- 7 -

Dupliquer le modèle maître avec les espaces bouchés et couler un modèle de travail.



- 8 -

Placer les cavaliers de la barre Dolder++ sur le modèle de travail.



- 9 -

Transférer les dents sur le modèle de travail à l'aide de la matrice.



- 10 -

Appliquer la cire sur la prothèse dans le cadre du procédé.



- 11 -

Mettre la prothèse en moufle, injecter l'acrylique et fabriquer la prothèse à l'aide du système et des produits de son choix. Suivre les recommandations du fabricant pour les rapports de mélange, les temps de cuisson et les températures.



- 12 -

Démouler la prothèse, enlever l'excédent et polir la prothèse.



PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Dolder ++

- 13 -

Voici la prothèse pour la barre Dolder++ une fois terminée.

