

PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Barre ReBourke

- 1 -

Voici la prothèse sur le modèle après que l'essai en bouche a été effectué. Le cas a été envoyé à Panthera Dental pour la fabrication de la barre.



- 2 -

Faire une matrice de la prothèse à l'aide du silicone de votre choix. Il est recommandé d'utiliser un silicone rigide.



- 3 -

Voici la barre et la double structure terminées .



- 4 -

Visser la barre sur le modèle maître.



- 5 -

Lors de l'application de la cire sur le modèle maître, l'attache MK1 final doit être retiré et remplacé avec la tige d'aide en acrylique.



- 6 -

Retirer l'attache MK1 final avec l'outil fourni.



PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Barre ReBourke

- 7 -

Placer la double structure sur la barre sur le modèle maître.



- 8 -

Insérer la tige d'aide en acrylique.



- 9 -

Transférer les dents sur la double structure à l'aide de la matrice.



- 10 -

Terminer la prothèse en cire pour le procédé en s'assurant que la cire est bien adaptée aux tissus étant donné que le procédé s'effectuera sans le modèle maître.



- 11 -

Retirer les tiges d'aide en acrylique.



- 12 -

Retirer la prothèse en cire du modèle, réinsérer les tiges d'aide en acrylique pour l'attachement MK1 en vue de la mise en moufle.



PROCÉDURES POUR LES BARRES SUR IMPLANTS DE PANTHERA DENTAL



Barre ReBourke

- 13 -

Remplir la double structure d'un silicone rigide. Il est important de pousser le silicone directement dans la double structure pour s'assurer qu'aucun acrylique ne se loge sous la double structure et cela maintiendra la double structure en place lorsqu'on fera bouillir la cire. Le silicone facilitera également le démoulage.



- 14 -

Le cas est emmoufflé sans le modèle, directement dans le moufle. Il est primordial de s'assurer que les tiges de fabrication sont recouvertes afin d'éliminer toute contre-dépouille, ce qui pourrait causer des problèmes lors du processus de bourrage.



- 15 -

Couvrir les dents de Flexistone (facultatif) et faire la procédure de cuisson.



- 16 -

Une fois le cas démoufflé, retirer les tiges d'aide en acrylique, enlever l'excédent et polir la prothèse comme d'habitude.



- 17 -

Insérer l'attachement MK1 final.



- 18 -

Placer la prothèse terminée sur le modèle maître. S'assurer que les attachements MK1 sont entièrement insérés et polir les tiges MK1 pour qu'elles soient au même niveau que l'acrylique. NOTE: il est important que les attachements MK1 soient entièrement insérés avant de tailler l'attachement.





Barre ReBourke

- 19 -

Faire une ouverture en forme d'entonnoir dans les trous d'accès du côté labial pour faciliter l'accès pour le patient afin de retirer l'attachement MK1.



- 20 -

Voici la prothèse pour la barre ReBourke une fois terminée.

